

Prostředek k rychlé dezinfekci

DESCOSEPT SPEZIAL

Rychlá dezinfekce bez alkoholu

- Zvláště vhodný pro plochy citlivé na alkohol
- Vysoký čistící účinek
- Krátká doba působení

Pěnová aplikace
k zamezení vzniku aerosolů



Popis výrobku

DESCOSEPT SPEZIAL je přípravek neobsahující alkohol připravený k okamžitému použití pro dezinfekci a čištění zdravotnického inventáře, zdravotnických prostředků a ploch všeho druhu.

Je zvláště vhodný pro zdravotnické prostředky a plochy citlivé na alkohol a rovněž na akrylátové sklo. Na bázi kvarterních amoniových sloučenin.

DESCOSEPT SPEZIAL neobsahuje alkoholy, aldehydy ani fenoly a navíc je pachově neutrální.

Oblasti použití

Podle Ustanovení o biocidech (BRP):

K dezinfekci a čištění ploch citlivých na alkohol a zdravotnického inventáře citlivého na alkohol.

Podle Ustanovení EU o zdravotnických prostředcích: Dezinfekce a čištění neinvazivních zdravotnických prostředků citlivých na alkohol.

Použití

Plochy setřete přípravkem DESCOSEPT SPEZIAL do úplného zvlhčení a nechte zaschnout na celou dobu působení.

Spektrum působení a doby působení			30 sec	1 min	2 min
Bakterie a kvasinky					
Doporučení pro použití k desinfekci ploch (baktericid, levurocid)*	VAH** / EN 16615	s mechanikou, vysoké zatížení		•	
Zapouzdřeným virům					
účinný proti všem zapouzdřeným virům	RKI/DVV	vč. HBV, HIV, HCV	•		
	EN 14476	nízké zatížení	•		
Nezapouzdřeným virům					
účinný proti papovavirům SV40	EN 14476	vysoké zatížení			•
účinný proti rotavirům	RKI/DVV		•		

* včetně testů fáze 2 stupně 1 – a fáze 2 stupně 2 (kvantitativní zkouška s použitím suspenze a praktické zkoušky na přenašeče zárodků)
** uveden ve sloupci 5 min. seznamu VAH

Normy EN			
Spektrum působení a doby působení			1 min
baktericid	EN 1040	Základní test	•
levurocid (C. albicans)	EN 1275	Základní test	•
baktericid (Zdravotnictví)	EN 13727	vysoké zatížení	•
levurocid (C. albicans, Zdravotnictví)	EN 13624	vysoké zatížení	•
baktericid (Potravinařství/Průmysl)	EN 1276 / EN 13697	vysoké zatížení	•
levurocid (C. albicans, Potravinařství/Průmysl)	EN 1650 / EN 13697	vysoké zatížení	•



Prostředek k rychlé dezinfekci

DESCOSEPT SPEZIAL

Rychlá dezinfekce bez alkoholu

Pokyny pro používání

DESCOSEPT SPEZIAL lze použít k dezinfekci otíráním nebo k aplikaci postříkáním ve formě pěny. Použití v systémech výdejníků utěrek z netkané textilie:

DESCOSEPT SPEZIAL je zvláště vhodný pro použití v systémech výdejníků utěrek z netkané textilie s certifikovanou účinností desinfekce a dobou účinnosti až 28 dní v kombinaci se systémy výdejníků utěrek z netkané textilie k opakovanému použití, jako DESCO/ECO WIPES.

Složení

100 g roztoku obsahuje:

0,5 g alkyl (C12-16) dimethylbenzylamoniumchlorid,

0,25 g didecyldimethylamoniumchlorid.

Znalecký posudek

Naše produkty jsou v plném rozsahu znalecky posouzeny. Na vyžádání vám poskytneme složku znaleckých posudků.

Bezpečnostní upozornění a upozornění na nebezpečí

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal schválené firmě zajišťující likvidaci nebo komunální sberne.

Pouze k profesionálnímu použití.

Výrobek	Obal	Obsah	Obsah	Kat. č.
DESCOSEPT SPEZIAL	Láhev s rozprašovačem	750ml	6	00-208-0075
	Láhev	1 L	10	00-208-010
	Kanýstr	5 L	3	00-208-050

CE 0482



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com

