

Koncentrát pro dezinfekci povrchů

CLEANISEPT®

Tekutý koncentrát pro čištění a dezinfekci povrchů

- Dezinfekce & dobrá čistící schopnost
- Neobsahuje alkohol
- Bez parfému



Vlastnosti produktu

CLEANISEPT je bezaldehydový koncentrát určený pro dezinfekci a čištění lékařských inventářů, zdravotnických prostředků a všech druhů povrchů. CLEANISEPT je založen na kvartérních amoniových sloučeninách. Je bez parfému, neobsahuje aldehydy ani fenoly a vyniká dobrou čistící schopností.

CLEANISEPT je ideální pro povrchovou dezinfekci neporézních povrchů. Je zvláště vhodný v místech kde kromě požadavků na vysoké hygienické požadavky je nutné použití produktu bez zápachu.

Oblast použití

Podle směrnice o zdravotnických prostředcích (ZP): Dezinfekce a čištění neinvazivních zdravotnických prostředků citlivých na alkohol, jako jsou plochy inkubátorů.

Podle nařízení o biocidních přípravcích: Pro povrchovou dezinfekci a čištění lékařského inventáře a všech druhů povrchů.

Návod na použití

Dezinfekce povrchu:

Aplikujte dostatečné množství čerstvě připraveného pracovního roztoku rovnoměrně a otírejte povrchy, dokud nejsou zcela mokré (roztírání). Po uplynutí expoziční doby případně otřete utěrkou na jedno použití.

Rozsah účinnosti a expoziční časy		1 min	5 min	15 min	30 min	60 min
Baktericidní a fungicidní						
Doporučené použití pro dezinfekci povrchů: test na 4 polích, Baktericidní, účinné proti kvasinkám) *	VAH/ EN 16615	s mechanickým působením, špinavé podmínky	7.5 %**		2.5 %	1 %
Obalené viry						
Účinný proti obaleným virům	RKI/DVV	vč. HBV/HIV/HCV	7.5 %	2.5 %	2%	
Neobalené viry						
Účinný proti SV40/papovavirus	EN 14476	špinavé podmínky		5%		2%
Účinný proti rotavirům	RKI/DVV	bez znečištění	0.5 %			
Další výsledky EN testu						
Baktericidní	EN 13727	špinavé podmínky		3%	1.5 %	
účinné proti kvasinkám (C. albicans)	EN 13624	špinavé podmínky	3%	0.75 %	0.5 %	

* Včetně testů fáze 2 kroku 1 a testů fáze 2 kroku 2 (kvantitativní suspenzní testy a kvantitativní testy nosičů)
** uvedeno v 5 min sloupci seznamu VAH

Při denním použití lze povrchy použít ihned po uschnutí.

Použití se suchými utěrkami:

CLEANISEPT lze použít se suchými utěrkami **ONE SYSTEM** pro pohodlnou a uživatelsky přívětivou aplikaci s osvědčenou efektivitou dezinfekčního prostředku a použitelností pracovního roztoku 42 dní nebo v kombinaci s **DESCO/ECO WIPES** s použitelností pracovního roztoku 28 dní.

Složení

100 g obsahuje:
3.33 g didyldimethylamonium chlorid,
6.66 g alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid.
Obsahuje: neiontové povrchové aktivní látky < 5%.

Schválení výrobce

Fa. Schmitz & Söhne, Wickede
Schválení výrobce pro použití na lékařských inventářích/polštářích firmy Schmitz & Söhne.



Konzentrát pro dezinfekci povrchů

CLEANISEPT®

Tekutý koncentrát pro čištění a dezinfekci povrchů

Znalecké posudky

Máme rozsáhlé odborné zprávy o všech našich produktech. Na požádání Vám rádi tyto odborné zprávy poskytneme.

Bezpečnostní pokyny a věty o nebezpečnosti

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Pouze pro profesionální použití.

Produkt	Balení/MJ	Obsah	Balení	REF
CLEANISEPT	dávkovací láhev	1 L	10	00-204-010
	láhev	2 L	6	00-204-020
	kanystr	5 L	3	00-204-050
	kanystr	10 L	1	00-204-100
Aplikační omůcky	dávkovací láhev	1000 ml	1	00-904-010
	dávkovací pumpička	2L/5 L/10 L	1	00-906-000-01
	kohoutek	2L/5 L/10 L	1	00-907-000
Další pomůcky	otvírač kanystrů	-	1	00-909-050

CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Používejte dezinfekční prostředky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace na štítcích jednotlivých produktů.

Dr. Schumacher je certifikován dle DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011, je ověřený v systému environmentálního řízení a auditu podle EMAS a je členem IHO, VCI, BAH, DGSV a DGK H. www.schumacher-online.com

