

Konzentrát pro dezinfekci povrchů

OPTISAL® N

Tekutý koncentrát pro čištění a dezinfekci povrchů

- Určený pro každodenní použití
- Vynikající čisticí schopnost
- Příjemná a svěží vůně



Vlastnosti produktu

Optisal® N je uživatelsky přívětivý koncentrát pro dezinfekci a čištění neinvazivních zdravotnických prostředků, lékařských inventářů a všech druhů povrchů. Výrobek má mimořádně vysokou čisticí schopnost. Navíc má svěží a příjemnou vůni, protože neobsahuje aldehydy ani fenoly. Díky jeho složení bez KAS (kvartérní amoniové sloučeniny) je zabráněno lepivým účinkům na ošetřených plochách. Používání přípravku **Optisal® N** se zvláště doporučuje ve všech oblastech, kde kromě dodržování vysokých hygienických požadavků se je třeba vyhnout i nepříjemným zápachům. Je vhodný pro podlahy z PVC / linoleum.

Oblast použití

Podle směrnice o zdravotnických prostředcích (ZP): Bezaldehydová dezinfekce a čištění neinvazivních zdravotnických prostředků.

Podle nařízení o biocidních přípravcích: Povrchová dezinfekce a čištění lékařského inventáře a všech druhů povrchů

Návod na použití

Povrchová dezinfekce stíráním (doporučený postup): Aplikujte dostatečné množství připraveného pracovního roztoku **Optisal® N** na povrchy, které mají být dezinfikovány. Pro úplné namočení všech povrchů použijte mechanické působení (roztírání).

Rozsah účinnosti a expoziční časy			5 min	15 min	30 min	60 min	240 min
Bakterie a kvasinky							
Doporučené použití pro dezinfekci povrchů: Baktericidní, účinné proti kvasinkám *	VAH/EN 16615	s mechanickým, působením, špinavé podmínky		1 %		0.5 %	
tuberkulocidní (M. terrae)	EN 14348	čisté podmínky				0.5 %	
dezinfekci povrchů: Baktericidní, účinné proti kvasinkám *	VAH	čisté podmínky					0.25 %
Obalené viry							
Účinný proti obalovým virům	RKI/DVV	vč. HBV/HIV/HCV		1%		0.5 %	
	EN 14476	čisté podmínky			0.5 %		
Dodatečné testovací výsledky							
baktericidní	EN 13727	špinavé podmínky		0.25 %			0.125 %
		čisté podmínky		0.25 %	0.125 %		
účinný proti kvasinkám (Candida albicans)	EN 13624	špinavé podmínky	0.25 %				
		čisté podmínky	0.125 %				

*Včetně testů fáze 2 kroku 1 a testů fáze 2 kroku 2 (kvantitativní suspenzní testy a kvantitativní testy nosičů)

Poznámky

Optisal® N lze použít s **Desco Wipes DT** systémem pro pohodlnou a uživatelsky přívětivou aplikaci s osvědčenou efektivitou dezinfekčního prostředku a použitelností pracovního roztoku 28 dní. Nepoužívejte v kombinaci s aldehydovými přípravky. Před prvním použitím produktu **Optisal® N** se doporučuje povrchy důkladně očistit

vhodným výrobkem, např. **Hansa Clean Spezial Cleaner**.

Složení

100 g obsahuje:
7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin



Koncentrát pro dezinfekci povrchů

OPTISAL® N

Tekutý koncentrát pro čištění a dezinfekci povrchů

Znalecké posudky

Máme rozsáhlé odborné zprávy o všech našich produktech. Na požádání Vám rádi tyto odborné zprávy poskytneme.

Bezpečnostní pokyny a věty o nebezpečnosti

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Pouze pro profesionální použití.

Produkt	Balení/MJ	Obsah	Balení	REF
OPTISAL N	sáček	40 ml	100	00-214-0004-01
	láhev	1 L	10	00-214-010
	kanistr	5 L	3	00-214-050
Aplikační pomůcky	dávkovací pumpička	500/1000 ml	1	00-906-005-02
	dávkovací pumpička	2L/5 L/10 L	1	00-906-000-01
	kohoutek	2L/5 L/10 L	1	00-907-000
Další pomůcky	otvírač kanistrů	-	1	00-909-050

CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Používejte dezinfekční prostředky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace na štítech jednotlivých produktů.

Dr. Schumacher je certifikován dle DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011, je ověřený v systému environmentálního řízení a auditu podle EMAS a je členem IHO, VCI, BAH, DGSV a DGK H. www.schumacher-online.com

