

## Dezinfekční ubrousky

# CLEANISEPT® WIPES FORTE MAXI

## Bezalkoholové ubrousky pro rychlou dezinfekci

- univerzální, pohodlná a časově úsporná aplikace
- rozsáhlá a rychlá účinnost
- zvláště vhodné pro dezinfekci středně velkých ploch a v oblastech se zvýšenými požadavky na účinnost



### Vlastnosti produktu

CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI jsou bezalkoholové ubrousky, připravené ihned k použití pro virucidní dezinfekci a čištění všech druhů ploch a také povrchů zdravotnických prostředků, jakož i všech typů povrchů v oblastech se zvýšenými požadavky na účinnost.

CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI zajišťují univerzální a rychlé použití pro dezinfekci a čištění středně velkých ploch, odebírají se jednotlivě z opakovaně uzavíratelného zásobníku.

### Oblast použití

**Podle směrnice o zdravotnických prostředcích (ZP):** Rychlá dezinfekce a čištění zdravotnických prostředků citlivých na alkohol, jako jsou ultrazvukové sondy pro transvaginální a abdominální (zevní) ultrazvukové vyšetření.

### Podle nařízení o biocidních přípravcích:

Rychlá dezinfekce a čištění zdravotnického zařízení citlivého na alkohol a všech typů povrchů, a to i v oblastech se zvýšenými požadavky na účinnost.

Rozsah účinnosti a expoziční čas			2 min
<b>Bakterie a kvasinky</b>			
doporučená aplikace pro dezinfekci ploch (baktericidní, účinné proti kvasinkám)*	VAH**/ EN 16615	s mechanickým působením, špinavé podmínky	•
sporicidní (Clostridium difficile)	EN 13704		•
<b>Viry</b>			
virucidní	RKI/DVV	vč. polio-, adeno-, noroviru a SV40/ papova-/ polyomaviru	•
virucidní	EN 14476/prEN 16777	čisté podmínky	•
účinný proti polyomavirům	4-field-test / practical carrier test		•

\* včetně testů fáze 2 kroku 1 a testů fáze 2 kroku 2 (kvantitativní suspenzní testy a praktické testy nosičů zárodečných kmenů) \*\* uvedené ve sloupci 5 minut seznamu VAH

### Návod na použití

Setřete povrch ubrouskem CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI až do úplného navlhčení a nechte jej uschnout.

### Poznámky

Doba použitelnosti po otevření: 28 dní

### Složení

100 g roztoku obsahuje :  
0.4 g Kwartérní amoniové sloučeniny,  
benzyl-C12-16-alkyldimethyl chlorid  
0.2 g didecyldimethylamoniumchloridu



Dezinfekční ubrousky

# CLEANISEPT® WIPES FORTE MAXI

Bezalkoholové ubrousky pro rychlou dezinfekci

## Znalecké posudky

Máme rozsáhlé odborné zprávy o všech našich produktech. Na požádání Vám rádi tyto odborné zprávy poskytneme.

## Bezpečnostní pokyny a věty o nebezpečnosti

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Pouze pro profesionální použití.

Produkt	Balení/MJ	JB	Obsah	Velikost	REF
CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI	otevírací zásobník	12	100 utěrek	20 x 22 cm	00-235-T100EXP

CE 0482



Používejte dezinfekční prostředky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace na štítcích jednotlivých produktů.

Dr. Schumacher je certifikován dle DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011, je ověřený v systému environmentálního řízení a auditu podle EMAS a je členem IHO, VCI, BAH, DGSV a DGK H. [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)

